

הוראות הפעלה - מד לחץ דם Omron RS2

הוראות כלליות והפעלה:

1. יש לבצע את המדידה בישיבה לאחר מנוחה של כ-10 דקות.
2. יש לכרוך את השרוול סביב שורש כף יד שמאל, כך שהמכשיר יונח כ- 1.5 ס"מ מעל שורש כף היד




3. המדידה תעשה בישיבה מול השולחן.
4. הנח את המרפק על השולחן והרם את המכשיר לגובה הלב לפי הציור.



5. לחץ על כפתור **START/STOP** להתחלת המדידה, בזמן המדידה לא לזוז ולא לדבר.
6. יש לבצע 2 מדידות בהפרש 1-2 דקות בין מדידה למדידה ולהתייחס לתוצאות המדידה השנייה.
7. מטרת המדידה הראשונה הינה הסתגלות למכשיר ולכן אין להתייחס לתוצאות הבדיקה הראשונה (שהיא לרב גבוהה יותר).
8. חשוב לזכור כי בימים הראשונים של השימוש במכשיר תתכן קבלת תוצאות גבוהות מהתוצאות הרגילות. תופעה זו נפוצה ונובעת מעצם השימוש במכשיר החדש.

זיכרון (סך הכל 30 זיכרונות)

1. להצגת זיכרון המדידות הקודמות יש ללחוץ על לחצן הזיכרון 

למחיקת כל הזיכרונות יש להציג את אחד הזיכרונות על ידי לחיצה על כפתור הזיכרון ולאחר מכן על ידי לחיצה ארוכה על כפתור הזיכרון וכפתור ההפעלה **START/STOP** בו זמנית. המכשיר ימחק את כל הזיכרונות במכשיר.